

## Inhaltsverzeichnis:

1. Einschalten der Pumpe
2. Entsperren der Pumpe
3. Verändern der Parameter
4. Zurücksetzen Boli gegeben / versucht
5. Entlüften / primen der Leitung
6. Sperren der Pumpe
7. Starten der Pumpe
8. Bolus auslösen
9. Pumpe ausschalten



CADD-Legacy PCA Pumpe –  
Bildquelle: [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Medipro Ärztebedarf GmbH  
Alois-Senefelder-Str. 2  
68167 Mannheim

Tel.: +49 621 3098096-0  
Fax: +49 621 3098096-55  
Mail: [info@medipro-mannheim.de](mailto:info@medipro-mannheim.de)

## 1. Einschalten der Pumpe:

Schalten sie die Pumpe durch Drücken der **EIN / AUS** Taste ein, **ODER** legen sie Batterien in das Batteriefach ein ⇒ die Pumpe schaltet automatisch ein.

- ☛ Der Selbsttest startet, es werden die letzten Pumpeneinstellungen nacheinander im Display angezeigt. Abschließend piept die Pumpe 6mal.

## 2. Entsperren der Pumpe:

Drücken sie die **VERRIEGELUNGSTASTE**. (Bei „laufender“ Pumpe muss diese zunächst gestoppt werden ⇒ Drücken sie mind. 3 Sekunden die **START / STOP** Taste ⇒ STOP erscheint im Display).

- ☛ Verriegelungsstufe LL2 erscheint im Display (wenn nicht ist die Pumpe bereits entsperrt und es kann mit Punkt 3 fortgefahren werden).
- ☛ Drücken sie die **PFEILTASTE nach unten** bis LL0 im Display erscheint.
- ☛ Drücken sie die **EINGABE / LÖSCHEN** Taste, CODE erscheint im Display.
- ☛ Halten sie die **PFEILTASTE nach oben** bis CODE 63 erreicht ist. (Eventuelle Korrekturen können mit **der PFEILTASTE nach unten** vorgenommen werden)
- ☛ Drücken sie die **EINGABE / LÖSCHEN** Taste.
- ☛ Die Pumpe ist nun entsperrt, Parameter können jetzt verändert werden.

## 3. Verändern der Parameter:

Drücken sie bei entsperrter Pumpe im STOP Modus die **WEITER** Taste.

- ☛ Nun können nacheinander die einzelnen Parameter (Reservoir Volumen ⇒ Einheiten ⇒ Konzentration ⇒ Kontin.-Rate ⇒ Bolus ⇒ Bolus Sperrzeit ⇒ Boli pro Stunde) mit Hilfe der **PFEILTASTEN** verändert werden.
- ☛ Haben sie einen Parameter verändert drücken sie zum Speichern die **EINGABE / LÖSCHEN** Taste.
- ☛ Um zum nächsten Parameter zu gelangen drücken sie die **WEITER** Taste.

## 4. Zurücksetzen von BOLI gegeben / versucht:

Drücken sie bei entsperrter Pumpe im STOP Modus die **WEITER** Taste mehrfach bis Boli gegeben im Display erscheint.

- ✦ **EINGABE / LÖSCHEN** Taste drücken.
- ✦ Boli gegeben wird auf **0** zurückgesetzt.
- ✦ **WEITER** Taste drücken, Boli versucht erscheint.
- ✦ **EINGABE / LÖSCHEN** Taste drücken.
- ✦ Boli versucht wird auf **0** zurückgesetzt.

## 5. Entlüften einer Leitung:

Drücken sie bei entsperrter Pumpe im STOP Modus die **VORBEREITEN** Taste für mind. 3 Sekunden (Balken erscheinen).

- ✦ Lassen sie die **VORBEREITEN** Taste los und halten diese erneut gedrückt.
- ✦ Entlüften startet bis die **VORBEREITEN** Taste wieder losgelassen wird.

## 6. Sperren der Pumpe:

Drücken sie im STOP Modus die **VERRIEGELUNGSTASTE**

- ✦ Geben sie mit Hilfe der **PFEILTASTEN nach oben** LL2 ein.
- ✦ **EINGABE / LÖSCHEN** Taste drücken, Code erscheint im Display.
- ✦ Mit Hilfe der **PFEILTASTEN** Code 63 eingeben.
- ✦ **EINGABE / LÖSCHEN** Taste drücken, die Pumpe ist verriegelt.

## 7. Starten der Pumpe:

Drücken sie mindestens 3 Sekunden die **START / STOP** Taste (Balken erscheinen)

- ✎ Es erscheint **BETRIEB** und das aktuelle Reservoir Volumen im Display.
- ✎ *Die Pumpe kann auch im verriegelten Zustand gestartet und gestoppt werden.*

## 8. Bolus auslösen:

Drücken sie den schwarzen Knopf des Bolus Tasters tief ein, oder drücken sie die Taste **BOLUS** direkt auf der Pumpe.

- ✎ Ein akustisches Signal ertönt, und der (programmierte) Bolus wird sofort abgegeben.

## 9. Pumpe ausschalten:

Halten sie im **STOP** Modus die **EIN / AUS** Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt (Balken erscheinen).

- ✎ Die Pumpe schaltet ab, das Display erlischt.
- ✎ *Die Pumpe kann auch im verriegeltem Zustand **AUS** geschaltet werden.*

Diese Kurzanleitung wurde unter Einbeziehung der Gebrauchsanleitung von Smith Medical erstellt und ist ausschließlich für den internen Gebrauch zu verwenden. Eine Kopie oder unautorisierte Weitergabe ist nicht gestattet. Sie dient lediglich der Orientierung und ersetzt nicht die originale Gebrauchsanweisung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne montags bis donnerstags von 8:00 bis 16:30 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 15:30 Uhr unter der **0621 30980960** zur Verfügung. In dringenden Fällen können Sie unsere Rufbereitschaft unter der Telefonnummer **0174 8584864** kontaktieren.