

Inhaltsverzeichnis:

1. Batteriebestückung
2. Einschalten/Ausschalten
3. Programmierung
4. Infusion Start
5. Pause/ohne Beutelwechsel
6. Infusionsende/Beutelwechsel
7. Löschen des Verlaufsberichts



Ambit PCA Pumpe –
Bildquelle: www.teleflex.com

Medipro Ärztebedarf GmbH
Alois-Senefelder-Str. 2
68167 Mannheim

Tel.: +49 621 3098096-0
Fax: +49 621 3098096-55
Mail: info@medipro-mannheim.de

1. Batteriebestückung:

(empfohlen Alkali-Batterien)

- ✦ Batteriedeckel öffnen, Batterien einfügen.
- ✦ Batteriedeckel aufsetzen, bis zu Anschlag drücken und im Uhrzeigersinn drehen. Batteriedeckel nicht überdrehen!

2. Einschalten/Ausschalten:

- ✦ Einschalten: Batteriedeckel leicht nach rechts drehen = Markierung **ON**
- ✦ Ausschalten: Batteriedeckel leicht nach links drehen = Markierung **OFF**

3. Programmierung:

- ✦ Pumpe im Pausenmodus; Displayanzeige (II)
- ✦ Start/Stop Taste [➤/II] und (П) Knopf gleichzeitig für ca. 2 Sek. Gedrückt halten Piepton ertönt; Displayanzeige: **PRO**
- ✦ Display wechselt auf die nächste Anzeige __. __ ml/h (Flußrate)
- ✦ Kurzes Drücken der Start/Stop Taste [➤/II] — Wert erhöht sich
- ✦ Kurzes Drücken des (П) Knopfes — Wert vermindert sich
- ✦ Wert bestätigen: Start/Stop Taste [➤/II] für ca. 2 Sek. drücken bis Piepton ertönt, Anzeige springt auf die nächste Zahl weiter.
- ✦ Bei der Desferaltherapie werden nur die Flußrate und das Beutelvolumen eingestellt.

4. Infusion Start:

- ✦ Kassette auf die Pumpe setzen, Leitungen sind auf der linken Seite
- ✦ Pumpe einschalten = Markierung **ON**
- ✦ Pumpe durchläuft einen Selbsttest und steht dann im Pausenmodus; Displayanzeige (II)
- ✦ Start/Stop Taste [➤/II] drücken: ein einzelner Piepton ertönt
- ✦ Im Display erscheint **RX** und die Programmierung wird nochmals angezeigt
- ✦ Pumpe ist wieder im Pausenmodus; Displayanzeige (II)
- ✦ Start/Stop Taste [➤/II] nochmals drücken: es ertönt ein Piepton und die Infusion startet
- ✦ Anzeige auf dem Display **0 ml**

5. Pause/ohne Beutelwechsel

- ☛ Drücken der Start/Stop Taste [▶/⏸]
Es ertönt ein Piepton, Pause der Infusion
- ☛ Anzeige auf dem Display (II)
- ☛ Pumpe ausschalten = Markierung OFF

6. Infusionsende/Beutelwechsel

- ☛ Start/Stop Taste [▶/⏸] drücken zum Anhalten
- ☛ Kassette von der Pumpe entfernen
- ☛ Pumpe ausschalten = Markierung OFF

7. Löschen des Verlaufsbericht

Pumpe im Pausenmodus; Displayanzeige (II)

- ☛ (π) Knopf ca. 2 sec. gedrückt halten bis einzelner Piepton ertönt; Displayanzeige HX
- ☛ (π) Knopf **sofort** nochmals drücken und gedrückt halten bis Piepton ertönt; Displayanzeige HX 0 = Verlaufsbericht ist gelöscht

Bei jedem Beutelwechsel den Verlaufsbericht löschen!

Diese Kurzanleitung wurde unter Einbeziehung der Gebrauchsanleitung der Teleflex Medical GmbH erstellt und ist ausschließlich für den internen Gebrauch zu verwenden. Eine Kopie oder unautorisierte Weitergabe ist nicht gestattet. Sie dient lediglich der Orientierung und ersetzt nicht die originale Gebrauchsanweisung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne montags bis donnerstags von 8:00 bis 16:30 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 15:30 Uhr unter der **0621 30980960** zur Verfügung. In dringenden Fällen können Sie unsere Rufbereitschaft unter der Telefonnummer **0174 8584864** kontaktieren.